



Indicação de uso

Indicado para todos os tipos de feridas superficiais com ou sem exudatos, em pequena e média quantidade. Úlcera venosa em fase inicial, prevenção e tratamento de úlcera de decúbito superficial, queimaduras superficiais ou queimaduras pequenas, áreas doadoras de enxertos de pele, curativos pós-operatórios e períodos de granulação e epitelização de feridas.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A
CNPJ	78.742.491/0001-33
Autorização	1.02.969-0
Produto	Curativo Hidrocolóide Vital Derme

Modelo Produto Médico
VG1001, VG1002, VG2001, VG2002, VG2003, VG2004, VG2005, VG2006, VG3001, VG3002, VG3003, VG4001, VG4002, VG4003, VG4004, VG4005, VG4006, VG5001, VG5002, VG5003, VG6001, VG6002, VG6003, VG6004, VG6005, VG6006, VG7001, VG7002, VG7003, VG7004, VG7005, VG7006.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	CURATIVO HIDROCOLOIDE VITALDERME.pdf	3914819219 - 04/10/2021 15:54:27

Nome Técnico	Curativo
Registro	10296900070
Processo	25351479947201246
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

REGISTRO ANVISA: 10296900070

Características do produto

- Produto estéril - Esterilizado por radiação Gama

Curativo elástico composto de 3 hidrocolóides CMC (Carboximetilcelulose sódico + pectina e gelatina) em grânulos hidrofílicos, uma camada adesiva, CMC e poli-isobutileno com camada externa de filme de poliuretano. Promove e conserva um ambiente úmido ao redor da ferida favorecendo sua cicatrização e protegendo o tecido de granulação no leito da ferida, apresentando alta capacidade de absorção. Um gel úmido poderá ser formado quando o hidrocolóide absorve exudatos da ferida. Sua boa aderência serve como barreira protetora e evita as trocas frequentes, diminuindo o risco de infecção e a dor. É impermeável aos germes, formando uma barreira ativa contra as bactérias do ambiente externo, protegendo a ferida de contaminações secundárias. Quando utilizado na ferida operatória ou no pós-operatório, dispensa o uso de gazes, adesivos ou faixas.

Modelos disponíveis em estoque


NORMAL	PLUS	ULTRA FINO
VG2002 - 6 x 6cm	VG7002 - 6 x 6cm	VG4002 - 6 x 6cm
VG2004 - 10 x 10cm	VG7004 - 10 x 10cm	VG4003 - 15 x 8cm (Região Sacral)
VG2005 - 15 x 15cm	VG7005 - 15 x 15cm	VG4004 - 10 x 10cm
VG3003 - 15 x 18cm (Região Sacral)	VG7006 - 20 x 20cm	VG4005 - 15 x 15cm
VG2006 - 20 x 20 cm		VG4006 - 20 x 20cm





Instruções de uso

Limpar adequadamente a ferida conforme rotina, preferencialmente com solução fisiológica 0,9%. Secar adequadamente o local com cuidado para não causar trauma no tecido de granulação. Selecionar o tamanho do curativo a ser utilizado, que deverá ser 2cm maior que área da ferida para melhor assegurar a aderência do curativo na pele. Remover a película protetora e aplicar o curativo, evitando contato com sua parte interna para não contaminá-lo.

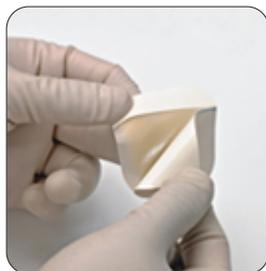

Remover a película protetora e aplicar o curativo.



Evite contato com a parte interna do curativo para não contaminá-lo.



Selecionar adequadamente o tamanho do curativo a ser utilizado, que deverá ser 2 cm maior que área da ferida para melhor assegurar a aderência do curativo na pele

A troca do curativo deverá obedecer a rotina da instituição ou sempre que ficar branco e se expandir ou descolar. Poderá ocorrer a formação de um gel, resultado do exudato e do hidrocolóide que poderá ter aparência de secreção, o que é incorreto. Neste caso, apenas basta limpar o local conforme preconizado. Para remover o curativo, levantar cuidadosamente uma de suas extremidades, mantendo pressionado contra a pele. Proceder deste modo ao redor da base ferida até que todas as extremidades deixem de estar em contato com a pele. Limpar a ferida e aplicar novo curativo se indicado.

Composição

- Película protetora de poliuretano e papel glassine.
- Curativo hidrocolóide de carboximetilcelulose adesivo.

Advertências e precauções

- Se a ferida apresentar profundidade maior que 5mm, deverá ser utilizado um curativo adequado para o tratamento, antes de usar o curativo hidrocolóide como cobertura. Não deverá ser utilizado em feridas muito exudativas. Em caso de alergias, descontinuar o uso do produto.
- Este produto poderá ser manuseado por adultos e profissionais da área da saúde.
- Descartar de acordo com as normas de biossegurança recomendadas.
- Artigo médico-hospitalar de uso único, destruir após o uso, atóxico.
- Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.
- Respeitar sempre o prazo de validade.
- O produto não é indicado para feridas infectadas, feridas com exposição óssea, muscular ou de tendões, vasculites e queimaduras de terceiro grau.

Validade

- 5 anos após a data de fabricação.

Armazenamento, conservação e transporte

- Estocar em local seco e arejado.
- Proteger do calor (temperatura inferior a 30°C) e da umidade (inferior a 80%).
- Proteger da luz (solar ou artificial potente).
- Acondicionar em caixa de papelão.



Curativo hidrocolóide Vitalderme



VITAL DERME

Imagens do produto




Normal



Região sacral
Normal



Ultra-fino

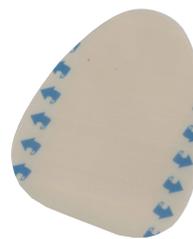

Região Sacral
Ultra-fino



Plus

Espessura aproximada do gel hidrocolóide nos modelos:

Curativo Hidrocolóide Normal - 3 mm ~ 1 mm

Curativo Hidrocolóide Ultra-fino – 2,5mm

Curativo Hidrocolóide Plus – Hidrocolóide 3mm, Espuma 2 mm

Embalagens

NORMAL	PLUS	ULTRA FINO
VG2002 - 6 x 6cm cx com 20 unidades	VG7002 - 6 x 6cm cx com 20 unidades	VG4002 - 6 x 6cm cx com 20 unidades
VG2004 - 10 x 10cm cx com 10 unidades	VG7004 - 10 x 10cm cx com 10 unidades	VG4003 - 15 x 18cm cx com 05 unidades (Região Sacral)
VG2005 - 15 x 15cm cx com 05 unidades	VG7005 - 15 x 15cm cx com 05 unidades	VG4004 - 10 x 10cm cx com 10 unidades
VG3003 - 15 x 18cm cx com 05 unidades (Região Sacral)	VG7006 - 20 x 20cm cx com 05 unidades	VG4005 - 15 x 15cm cx com 05 unidades
VG2006 - 20 x 20 cm/ caixa com 05 unidades		VG4006 - 20 x 20cm cx com 05 unidades



Embalagem primária



Embalagem secundária



Embalagem transporte

Importado e distribuído por

JoãoMed comércio de materiais cirúrgicos Ltda. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr, 406 - Xaxim - CEP 81630-280

Curitiba - Paraná - Brasil



JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Rua Wilson Lois K. Junior 406 | CEP 81630-280 | Xaxim | Curitiba - PR | Brasil

@ contato@joaoemed.com.br

☎ (41) 2108-4545

🌐 www.joaoemed.com.br